

2025 年 6 月現在

オリンパスマーケティング株式会社
ASP Japan 合同会社

オリンパス製品のステラッド®滅菌システム適合性一覧

＜適合性を示す記号＞

- ◎ : ステラッド®滅菌システムがご利用頂けます。
- : ステラッド®滅菌システムがご利用頂けますが、機能に影響しない外観上の変化(黒色アルミニウムの退色など)が起こる場合があります。
- ☆ : ステラッド®滅菌システムがご利用頂けますが、機能に影響する変化が起こる場合があります。詳しくは備考欄をご参照ください。それに加えて、機能に影響しない外観上の変化(黒色アルミニウムの退色など)が起こる場合があります。
- × : ステラッド®滅菌システムで未検証または、「滅菌の効果」と「製品の耐久性」のどちらか、あるいは両方で不適と判断されたことより、適合性がありません。ステラッド®滅菌システムで処理しないでください。

本一覧に記載されている製品の耐久性は、オリンパスメディカルシステムズ株式会社または OLYMPUS WINTER & IBE GMBH、Gyrus ACMI Inc.が判断しております。また、本一覧において「◎、○、☆」の記号が付与されている製品は、ASP Japan 合同会社によって滅菌の効果が確認されております。なお、ステラッド®滅菌システムのご使用にあたっては、各種オリンパス製品と滅菌器の取扱説明書も合わせてご確認ください。

＜注意事項＞

1. 使用前の点検

機器を安全にご使用頂くためには、使用前の点検は欠かせません。製品の点検方法やご使用上の注意については、オリンパス製品の添付文書および取扱説明書や、ステラッド®の添付文書および取扱説明書をご覧ください。

2. 劣化の現象について

- ・ 一覧表に示した適合性は、新品の内視鏡製品を用いて評価した結果に基づいています。このため、お使いの製品の状態によっては、記載されている現象と異なる結果が生じる可能性があります。
- ・ 保証期間を過ぎた製品の修理は有償となります。

3. 専用トレーの使用

本一覧で、ステラッド®滅菌システムが適用可能とされている機器を処理する際は、ASP Japan 合同会社より販売されている専用トレーをご使用頂く必要があります。トレーの詳細については ASP Japan 合同会社にお問い合わせください。

4. 本一覧に記載のない製品

オリンパスマーケティング株式会社または ASP Japan 合同会社までお問い合わせください。

5. 本一覧の記載と取扱説明書記載(2021 年 5 月 MDR 有効化以降)の差異について


欧州の医療機器規制である「欧州医療機器規則」(MDR)への適合に伴い、「硬性鏡およびアクセサリ類」に記載した製品の取扱説明書において、ステラッド®滅菌システムへの適用の記載が変更されている製品があります。

本変更にあたって、MDR 有効化以前に発売された製品について、記載変更前の取扱説明書に従ったリプロセスが無効ではないことが確認されています。

このため、本一覧の「硬性鏡およびアクセサリ類」の記載については、MDR 有効化の影響を除いた適合性情報を掲載しております。

6. ブースターご使用時の注意

ステラッド®100Sにて鉗子チャンネル付きの内視鏡を滅菌する場合は、チャンネルの長さ／内径／材質によっては、ASP Japan合同会社より販売されているブースターを取り付ける必要があります。ただし、ブースターは内視鏡先端には装着しないでください(右記図参照)。詳しくはASP Japan合同会社にお問い合わせください。

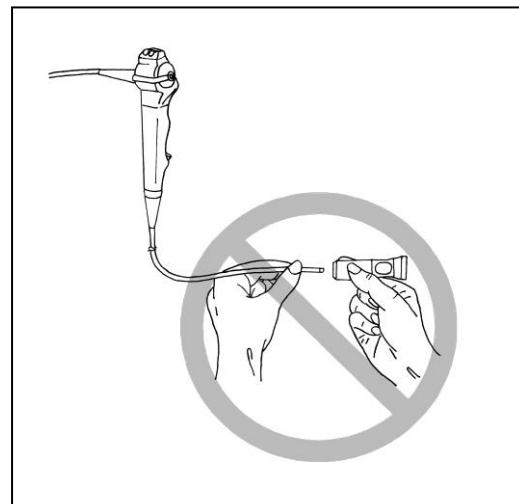

ご不明な点などがございましたら、オリンパスマーケティング株式会社またはASP Japan合同会社までお問合せ下さい。

硬性鏡およびアクセサリ類

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
オートクレーブ対応 テレスコープ	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	製品の取扱説明書をご参照ください。
オートクレーブ対応 手術用テレスコープ	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
オートクレーブ対応 ビデオテレスコープ	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
オートクレーブ対応 ウレテロスコープ	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
オートクレーブ非対応 テレスコープ	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
OES ELITE ウレテロレ ノスコープ WA2UR11A WA2UR14A WA2UR21A	×	×	×	×	×	×	
OES ELITE 光学視管 WA2T400A WA2T412A WA2T430A WA2T470A WA2T43WA	◎	◎	×	◎	×	◎*	光学視管用保護チューブ(WA2P400A)は適用外です。 *100NX においては、スタンダードサイクルとエクスプレ スサイクルに対応
高解像硬性腹腔・胸腔 鏡 WA4KL100 WA4KL130 WA4KL145 WA4KL500 WA4KL530 WA4KL545	◎	◎	◎	◎	×	◎*	*100NX においては、スタンダードサイクルとエクスプレ スサイクルに対応
高解像硬性鼻咽喉鏡 WA4KS400 WA4KS430 WA4KS445 WA4KS470	◎	◎	◎	◎	×	◎*	*100NX においては、スタンダードサイクルとエクスプレ スサイクルに対応

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
赤外対応高解像硬性 腹腔・胸腔鏡 WAIR100A WAIR130A WAIR500A WAIR530A	◎	◎	◎	◎	×	◎*	*100NX においては、スタンダードサイクルとエクスプレ スサイクルに対応
赤外対応高解像硬性 腹腔・胸腔鏡(ショート) WA4KT130	◎	◎	◎	◎	×	◎*	*100NX においては、スタンダードサイクルとエクスプレ スサイクルに対応
高解像硬性関節鏡 WA4KA400 WA4KA430 WA4KA470	◎	◎	◎	◎	×	◎*	*100NX においては、スタンダードサイクルとエクスプレ スサイクルに対応
ENDOEYE 3D 硬性ビデ オスコープ WA50080A WA50082A	○	×	×	○	×	○*	*100NX においては、スタンダードサイクルとエクスプレ スサイクルに対応
オートクレーブ対応 ライトガイドケーブル	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	製品の取扱説明書をご参照ください。
メカニカル(光学要素なし) ライトガイドアダプター	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
光学(レンズ/ファイバ ーつき) ライトガイドアダプター	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
レゼクトシース、送水リ ング、膀胱鏡用シース	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
マンドリン	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
ブリッジ、光学マンドリ ン、チャンネルつき/チ ャンネルなしワーキン グインサート	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
ヘーベルつきワーキン グインサート	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
レゼクトハンドル、ハン ドル(モノポーラ、バイ ポーラ、ナイフ/プロー ブ用)	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
アタッチメント	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
高周波レゼクト電極	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	製品の取扱説明書をご参照ください。
高周波電極(硬性)	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
高周波電極(軟性)	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
ナイフ	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
膀胱用シリンジ	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
光学鉗子	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
軟性 / 準軟性鉗子 (3-9Fr.)	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
トロツカーチューブ、トロツカースパイク、バルブ、ダイレーター(腹腔鏡用/胸腔鏡用)	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
リダクションチューブ、ガイドチューブ(腹腔鏡用/胸腔鏡用)	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
トロツカーチューブ、トロツカースパイク、ブリッジ(関節鏡用)	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
EKLブローブ	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	ご使用前の点検を必ず実施してください。A コードコネクタ部分の接着剤が劣化して交換が必要になる場合があります。
EHLブローブ	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
鉗子(硬性) T11xx、T12 xx (例 T1101 等)	☆	×	×	×	×	×	製品の取扱説明書をご参照ください。
一般/ モノポーラ鉗子	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
バイポーラ鉗子	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
ニードルホルダー	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
吸引/送水システム(ハンドル、バルブチューブ、吸引/送水チューブ)	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
探り針、リトラクター、キューレット	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
高周波ケーブル(Aコード)	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
オートクレーブ対応チューブ	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	製品の取扱説明書をご参照ください。
シールキャップ、シールリング	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
トレイ類	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
ステンレス製バスケット	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
クロムメッキ製品	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	備考参照	
テレスコープホルダ SH-1	◎	×	×	×	×	×	

呼吸器/外科軟性内視鏡およびアクセサリ類

気管支内視鏡

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
BF-1T60	×	☆	×	×	×	×	・ ご使用前の点検を必ず実施してください。100 サイクル以降は接着剤の劣化により挿入部の交換が必要になる可能性があります。 ・ ステラッド®滅菌前にEOG口金を取り付けてください。 ・ ステラッド®100S をご使用になる際には、ステラッド®滅菌前にブースターを装着してください。
BF-1T60（操作部に白線表示あり）	×	☆	☆	×	☆	×	
BF-P60	×	☆	×	×	×	×	
BF-P60（操作部に白線表示あり）	×	☆	☆	×	☆	×	
BF-XP60	×	☆	×	×	×	×	
BF-XP60（操作部に白線表示あり）	×	☆	☆	×	☆	×	・ 操作部に白線表示がある製品のシリアルナンバーは、7桁の数字の左から3桁目が4～9のいずれかになっております。
BF-F260	×	☆	×	×	×	×	
BF-F260（操作部に白線表示あり）	×	☆	☆	×	☆	×	
BF-P260F	×	☆	×	×	×	×	
BF-P260F（操作部に白線表示あり）	×	☆	☆	×	☆	×	
BF-XP260F	×	☆	×	×	×	×	・ ステラッド®滅菌前に防水キャップを外してください。 ・ ステラッド®100S をご使用になる際には、ステラッド®滅菌前にブースターを装着してください。
BF-XP260F（操作部に白線表示あり）	×	☆	☆	×	☆	×	
BF-H190	×	☆	☆	×	☆	×	
BF-1TQ290	×	☆	☆	×	☆	×	
BF-H290	×	☆	☆	×	☆	×	
BF-Q290	×	☆	☆	×	☆	×	・ ご使用前の点検を必ず実施してください。100 サイクル以降は接着剤の劣化により挿入部の交換が必要になる可能性があります。 ・ ステラッド®滅菌前に滅菌用キャップを取り付けてください。 ・ ステラッド®100S をご使用になる際には、ステラッド®滅菌前にブースターを装着してください。
BF-P290	×	☆	☆	×	☆	×	
BF-XP290	×	☆	☆	×	☆	×	
BF-MP290F	×	☆	☆	×	☆	×	
BF-H1200	×	☆	☆	×	☆	×	
BF-1TH1200	×	☆	☆	×	☆	×	

超音波気管支内視鏡

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
BF-UC260FW	×	☆	×	×	×	×	・ ご使用前の点検を必ず実施してください。100 サイクル以降は接着剤の劣化により挿入部の交換が必要になる可能性があります。 ・ ステラッド®滅菌前に防水キャップを外してください。 ・ ステラッド®100S をご使用になる際には、ステラッド®滅菌前にブースターを装着してください。
BF-UC290F	×	☆	×	×	×	×	・ ご使用前の点検を必ず実施してください。100 サイクル以降は接着剤の劣化により挿入部の交換が必要になる可能性があります。 ・ ステラッド®滅菌前に US コネクターキャップを取り付けてください。 ・ ステラッド®100S をご使用になる際には、ステラッド®滅菌前にブースターを装着してください。

胆道内視鏡

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
CHF-CB30L	×	☆	×	×	×	×	・ ご使用前の点検を必ず実施してください。100 サイクル以降は接着剤の劣化により挿入部の交換が必要になる可能性があります。 ・ ステラッド®滅菌前にEOG口金を取り付けてください。 ・ ステラッド®100S をご使用になる際には、ステラッド®滅菌前にブースターを装着してください。 ・ 操作部に白線表示がある製品のシリアルナンバーは、7 桁の数字の左から 3 桁目が 4～9 のいずれかになっております。
CHF-P60	×	☆	×	×	×	×	
CHF-P60（操作部に白線表示あり）	×	☆	☆	×	☆	×	
CHF-V	×	☆	×	×	×	×	
CHF-V（操作部に白線表示あり）	×	☆	☆	×	☆	×	
CHF-V2	×	☆	☆	×	☆	×	・ ご使用前の点検を必ず実施してください。100 サイクル以降は接着剤の劣化により挿入部の交換が必要になる可能性があります。 ・ ステラッド®滅菌前に滅菌用キャップを取り付けてください。 ・ ステラッド®100S をご使用になる際には、ステラッド®滅菌前にブースターを装着してください。

膀胱内視鏡、膀胱腎盂内視鏡

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
CYF-5A	×	☆	×	×	×	×	・ ご使用前の点検を必ず実施してください。100 サイクル以降は接着剤の劣化により挿入部の交換が必要になる可能性があります。 ・ ステラッド®滅菌前に EOG 口金(CYF-VHA には滅菌用キャップ)を取り付けてください。 ・ ステラッド®100S をご使用になる際には、ステラッド®滅菌前にブースターを装着してください。 ・ 操作部に白線表示がある製品のシリアルナンバーは、7 桁の数字の左から 3 桁目が 4～9 のいずれかになっております。
CYF-5A（操作部に白線表示あり）	×	☆	☆	×	☆	×	
CYF-VA2	×	☆	×	×	×	×	
CYF-VA2（操作部に白線表示あり）	×	☆	☆	×	☆	×	
CYF-VHA	×	☆	☆	×	☆	×	

耳鼻咽喉内視鏡

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
ENF-P4	×	×	×	×	×	×	・ ご使用前の点検を必ず実施してください。100 サイクル以降は接着剤の劣化により挿入部の交換が必要になる可能性があります。 ・ ステラッド®滅菌前にEOG口金を取り付けてください。 ・ ステラッド®100S を ENF-VT2/ENF-VT2（操作部に白線表示あり）/ENF-VT3 の処理にご使用になる際には、ステラッド®滅菌前にブースターを装着してください。 ・ 操作部に白線表示がある製品のシリアルナンバーは、7桁の数字の左から3桁目が4～9のいずれかになっております。
ENF-T3	×	×	×	×	×	×	
ENF-GP	☆	☆	×	×	×	×	
ENF-GP2	☆	☆	☆	☆	☆	×	
ENF-V2	☆	☆	×	×	×	×	
ENF-V2（操作部に白線表示あり）	☆	☆	☆	☆	☆	×	
ENF-V3	☆	☆	☆	☆	☆	×	
ENF-V4	☆	☆	☆	☆	☆	×	
ENF-VH	☆	☆	☆	☆	☆	×	
ENF-VH2	☆	☆	☆	☆	☆	×	
ENF-VT2	×	☆	×	×	×	×	
ENF-VT2（操作部に白線表示あり）	×	☆	☆	×	☆	×	
ENF-VT3	×	☆	☆	×	☆	×	
ENF-VQ	☆	☆	×	×	×	×	
ENF-VQ（操作部に白線表示あり）	☆	☆	☆	☆	☆	×	
ENF-XP	×	×	×	×	×	×	

子宮内視鏡

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
HYF-1T	×	×	×	×	×	×	
HYF-XP	×	☆	×	×	×	×	・ ご使用前の点検を必ず実施してください。100 サイクル以降は接着剤の劣化により挿入部の交換が必要になる可能性があります。 ・ ステラッド®滅菌前に EOG 口金を取り付けてください。
HYF-V	×	☆	×	×	×	×	

咽頭内視鏡

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
LF-P	×	×	×	×	×	×	
LF-DP	×	×	×	×	×	×	
LF-DP 7桁のシリアルナンバ ーの下5桁が 「11400」以上（2001 年7月以降生産品目 安）	×	☆	×	×	×	×	・ ご使用前の点検を必ず実施してください。100 サイクル以降は接着剤の劣化により挿入部の交換が必要になる可能性があります。 ・ ステラッド®滅菌前に EOG 口金を取り付けてください。 ・ ステラッド®100Sをご使用になる際には、ステラッド®滅菌前にブースターを装着してください。
LF-TP	×	×	×	×	×	×	
LF-TP 7桁のシリアルナンバ ーの下5桁が 「12250」以上（2001年 7月以降生産品目 安）	×	☆	×	×	×	×	・ ご使用前の点検を必ず実施してください。100 サイクル以降は接着剤の劣化により挿入部の交換が必要になる可能性があります。 ・ ステラッド®滅菌前に EOG 口金を取り付けてください。 ・ ステラッド®100Sをご使用になる際には、ステラッド®滅菌前にブースターを装着してください。
LF-GP	×	☆	×	×	×	×	
LF-V	×	☆	×	×	×	×	

腹腔・胸腔内視鏡

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
LTF-190-10-3D	☆	☆	☆	☆	☆	×	・ ご使用前の点検を必ず実施してください。100 サイクル以降は接着剤の劣化により挿入部の交換が必要になる可能性があります。
LTF-S190-10	☆	☆	☆	☆	☆	×	
LTF-S190-5	☆	☆	☆	☆	☆	×	
LTF-S300-10-3D	☆	☆	☆	☆	☆	×	・ ステラッド®滅菌前に滅菌用キャップを取り付けてください。
LTF-VP	☆	☆	×	×	×	×	・ ご使用前の点検を必ず実施してください。100 サイクル以降は接着剤の劣化により挿入部の交換が必要になる可能性があります。
LTF-VP（操作部に白線表示あり）	☆	☆	☆	☆	☆	×	
LTF-VP-S	☆	☆	×	×	×	×	
LTF-VP-S（操作部に白線表示あり）	☆	☆	☆	☆	☆	×	・ LTF-VH/LTF-VH（操作部に白線表示あり）は、ステラッド®滅菌前に滅菌用キャップを取り付けてください。
LTF-VH	☆	☆	×	×	×	×	・ LTF-VP/LTF-VP（操作部に白線表示あり） /LTF-VP-S/LTF-VP-S（操作部に白線表示あり）は、ステラッド®滅菌前に EOG 口金を取り付けてください。
LTF-VH（操作部に白線表示あり）	☆	☆	☆	☆	☆	×	・ 操作部に白線表示がある製品のシリアルナンバーは、7 桁の数字の左から 3 桁目が 4～9 のいずれかになっております。

細径胸腔内視鏡

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
LTF-260	×	☆	×	×	×	×	・ ご使用前の点検を必ず実施してください。100 サイクル以降は接着剤の劣化により挿入部の交換が必要になる可能性があります。 ・ ステラッド®滅菌前に防水キャップを外してください。 ・ ステラッド®100S をご使用になる際には、ステラッド®滅菌前にブースターを装着してください。 ・ 操作部に白線表示がある製品のシリアルナンバーは、7 桁の数字の左から 3 桁目が 4～9 のいずれかになっております。
LTF-260（操作部に白線表示あり）	×	☆	☆	×	☆	×	
LTF-H290	×	☆	☆	×	☆	×	

モバイル内視鏡

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
MAF-DM2	×	☆	☆	×	☆	×	・ ご使用前の点検を必ず実施してください。100サイクル以降は接着剤の劣化により挿入部の交換が必要になる可能性があります。 ・ ステラッド®滅菌前に滅菌用キャップを取り付けてください。 ・ ステラッド®100S をご使用になる際には、ステラッド®滅菌前にブースターを装着してください。 ・ 電池およびカードを装填した状態で処理してください。
MAF-GM2	×	☆	☆	×	☆	×	
MAF-TM2	×	☆	☆	×	☆	×	

尿管内視鏡

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
URF-P5	×	☆	×	×	×	×	・ ご使用前の点検を必ず実施してください。100 サイクル以降は接着剤の劣化により挿入部の交換が必要になる可能性があります。 ・ URF-P5/URF-P5（操作部に白線表示あり）/URF-P6/URF-P7/URF-V/ URF-V（操作部に白線表示あり）は、ステラッド®滅菌前に EOG 口金を取り付けてください。 ・ URF-V2/URF-V3 は、ステラッド®滅菌前に滅菌用キャップを取り付けてください。 ・ ステラッド®100S をご使用になる際には、ステラッド®滅菌前にブースターを装着してください。 ・ 操作部に白線表示がある製品のシリアルナンバーは、7 桁の数字の左から 3 桁目が 4～9 のいずれかになっております。
URF-P5（操作部に白線表示あり）	×	☆	☆	×	☆	×	
URF-P6	×	☆	☆	×	☆	×	
URF-P7	×	☆	☆	×	☆	×	
URF-V	×	☆	×	×	×	×	
URF-V（操作部に白線表示あり）	×	☆	☆	×	☆	×	
URF-V2	×	☆	☆	×	☆	×	
URF-V3	×	☆	☆	×	☆	×	

脳室内視鏡

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
VEF-V	×	☆	×	×	×	×	・ ご使用前の点検を必ず実施してください。100 サイクル以降は接着剤の劣化により挿入部の交換が必要になる可能性があります。 ・ ステラッド®滅菌前に EOG 口金を取り付けてください。

上記軟性内視鏡のアクセサリ類

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
T 字管（絶縁タイプ） MAJ-891	×	×	×	×	×	×	
T 字管（口金分岐型） MAJ-2092	◎	◎	◎	◎	×	×	
鉗子栓 MAJ-579	×	×	×	×	×	×	
吸引栓 MD-493	☆	☆	×	×	×	×	50 サイクル以降は吸引栓のカバーが吸引栓本体にとり つけにくくなることがあります。その場合は新品に交換 してください。
ミニチュア光源 MAJ-524	◎	◎	×	×	×	×	電池およびランプを装填した状態で処理してください。
充電式ミニチュア光源 WA91502A	◎	×	×	◎	×	◎	
ライトガイドアダプター MAJ-669, MAJ-900	◎	◎	×	×	×	×	
ライトガイドアダプター MAJ-1413	◎	◎	◎	◎	◎	×	
マウスピース MA-651	◎	◎	◎	◎	◎	×	
シリンダー栓 MAJ-1940	☆	☆	☆	☆	☆	×	
ゴムキャップ MH-364	◎	◎	◎	◎	◎	×	
レンズ洗滌シース MAJ-659/1345	×	×	×	×	×	×	
挿入補助具（LTF-VP 用） MAJ-1379	×	×	×	×	×	×	
EOG 口金 MB-156	◎	◎	◎	◎	◎	×	
滅菌用キャップ MAJ-1538	◎	◎	◎	◎	◎	×	
硬性シース （LTF-190-10-3D 用） MAJ-2079	◎	◎	◎	◎	×	×	
硬性シース用パッキン （LTF-190-10-3D 用） MAJ-2081	◎	◎	◎	◎	×	×	

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
防水キャップ MH-553	×	×	×	×	×	×	
スコープ ID タグ MAJ-1545	◎	◎	◎	◎	◎	×	
3D 調整キャップ MAJ-2266	☆	☆	☆	☆	☆	×	ご使用前の点検を必ず実施してください。製品の継ぎ目部の接着剤やはんだ部において、水泡などの何らかの変化が見られたときは、速やかに使用を中止してください。

TV カメラシステム類

カメラヘッド（VISERA シリーズ）

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
OTV-S7H-1D	◎	×	×	◎	◎	×	
OTV-S7H-1N	◎	×	×	◎	◎	×	
OTV-S7H-1NA	◎	×	×	◎	◎	×	
OTV-S7H-N	◎	×	×	◎	◎	×	
OTV-S7H-NA	◎	×	×	◎	◎	×	
OTV-S7H-1D-F08E	○	×	×	×	×	×	
OTV-S7H-1D-L08E	○	×	×	○	○	×	
OTV-S7H-D-L08E	○	×	×	○	○	×	
OTV-S7H-1NA-10E	◎	×	×	×	×	×	
OTV-S7H-1NA-12E	◎	×	×	×	×	×	
OTV-S7H-NA-10E	◎	×	×	×	×	×	
OTV-S7H-NA-12E	◎	×	×	×	×	×	
OTV-S7H-NA-10Q	◎	×	×	×	×	×	

カメラヘッド（VISERA Pro シリーズ）

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
OTV-S7ProH-HD-10E	◎	×	×	×	×	×	
OTV-S7ProH-HD-10Q	◎	×	×	×	×	×	
OTV-S7ProH-HD-12E	◎	×	×	×	×	×	
OTV-S7ProH-HD-12Q	◎	×	×	×	×	×	
OTV-S7ProH-HD-L08 E	◎	×	×	☆	☆	×	ご使用前の点検を必ず実施してください。ステラッド®NX®/100NX®Duoサイクルで処理したときは、100サイクル以降でカメラケーブルの外表面にべたつきを生じ、ケーブルの交換が必要になる可能性があります。

カメラヘッド（VISERA ELITE シリーズ）

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
CH-S190-08-LB	○	×	×	○	○	×	
CH-S190-XZ-E	◎	×	×	◎	◎	×	
CH-S190-XZ-Q	◎	×	×	◎	◎	×	

カメラヘッド（VISERA ELITE II シリーズ）

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
CH-S200-XZ-EB	◎	×	×	◎	◎	×	
CH-S200-XZ-EA	◎	×	×	◎	◎	×	
CH-S200-08-LB	◎	×	×	◎	◎	×	

カメラヘッド（4K シリーズ）

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
CH-S400-XZ-EA	○	×	×	○	○	×	・ オレドメ部に変色が起こる場合がありますが、機能に問題ありません。
CH-S400-XZ-EB	○	×	×	○	○	×	・ オレドメ部に変色が起こる場合がありますが、機能に問題ありません。

カメラヘッド(OTV-SC2)

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
CH-SC2-1D (OTV-SC2)	◎	×	×	☆	☆	×	ご使用前の点検を必ず実施してください。ステラッド®NX®/100NX®Duo サイクルで処理したときは、100 サイクル以降でカメラケーブルの外表面にべたつきを生じ、ケーブルの交換が必要になる可能性があります。

ビデオアダプター

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
A10-T1	×	×	×	×	×	×	
A10-T2	×	×	×	×	×	×	
AR-T10E	◎	×	×	×	×	×	
AR-T12E	◎	×	×	×	×	×	
AR-T10EA	○	×	×	☆	☆	×	・ 製品寿命が短くなることがあります。 ・ ご使用前の点検を必ず実施してください。製品の継ぎ目部の接着剤やはんだ部において、水泡などの何らかの変化が見られたときは、速やかに使用を中止してください。
AR-T12EA	○	×	×	☆	☆	×	
AR-T12QA	○	×	×	☆	☆	×	
AR-TL08E	×	×	×	×	×	×	
AR-TZ2	×	×	×	×	×	×	

ビデオカプラー

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
MH-999E 製品全体が 黒色	×	×	×	×	×	×	
MH-999E 製品全体が 銀色	◎	×	×	×	×	×	

TV カメラシステムのアクセサリ―類

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
EndoArm 製品 EAM-CM	◎	×	×	◎	×	×	

超音波手術システム製品類

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
ハンドピース MH-112/113/125	○	×	×	×	×	×	

マルチデブリッター製品類

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
ハンドピース MDHP100A/100S	×	×	×	×	備考 参照	備考 参照	ステラッド®100NX™のエクスプレスサイクルに対応 (◎)

消化器内視鏡およびアクセサリ―類（超音波消化器内視鏡も含む）

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
全機種 (GiF/CF/PCF/JF/ TJF/PJF/SiF/OSF/ GF/CHF-B シリ ーズ、およびそれらの アクセサリ―類など)	×	×	×	×	×	×	

軟性内視鏡用処置具類

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
全機種 (FB-**,FD-**, FG-**, FS-** など)	×	×	×	×	×	×	

超音波プローブ類

	適合性						備考
	100S		NX		100NX		
	ショート サイクル	ロング サイクル	アドバンスド サイクル	スタンダード サイクル	Duo サイクル	スタンダード サイクル	
内視鏡用超音波プローブ 全機種(UM-**など)	×	×	×	×	×	×	
超音波プローブ 全機種(RU-**, MH-** など)	×	×	×	×	×	×	